

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS VISEIRAS E ÓCULOS	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.008-02	02	1/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Segunda Revisão	Setembro 2021	

1. RESULTADOS ESPERADOS

Padronizar as ações para limpeza e desinfecção das viseiras, consolidando as orientações de proteção de pacientes e de profissionais e reduzir os riscos à saúde ocupacional; manter o material seco e limpo de forma segura, visando reduzir a carga microbiana natural dos artigos, minimizando os riscos; e reduzir carga microbiana natural dos artigos com a remoção de componentes orgânicos/inorgânicos e sujidades visíveis de infecção ao paciente, garantindo a eficácia na desinfecção e esterilização.

2. PROCESSOS/SETORES RELACIONADOS

Central Material de Esterilização.

3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

AÇÃO	RESPONSÁVEL	MATERIAIS	DESCRIÇÃO DA AÇÃO
LIMPEZA			
Realizar a Limpeza do Material	Técnico de Enfermagem	Viseiras/óculos	- Diluir a solução de detergente enzimático com a utilização dos EPI's, como: touca, máscara, óculos de proteção, protetor facial <i>Face Shield</i> , luvas de borracha cano longo reforçada e avental impermeável;

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

Elaborado por:

Gestão
Assistencial

LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DAS VISEIRAS E ÓCULOS

CODIFICAÇÃO

IT.COVID.008-02

VERSÃO

02

PÁGINA

2/7

RESUMO DE REVISÕES

DATA

DESCRIÇÃO

DATA PRÓX. REVISÃO

Abril 2020

Emissão Inicial

Julho 2020

Setembro 2020

Segunda Revisão

Setembro 2021

- Submergir os artigos completamente na solução de modo que toda superfície interna e externa permaneça em contato com a solução enzimática. Após 5 minutos de imersão lavar o artigo na cuba da pia do expurgo com auxílio de esponja macia;
- Desmontar e desconectar todos os componentes desmontáveis dos artigos;
- Promover a remoção completa de toda a sujidade visível dos artigos e devem ser enxaguadas com água abundante após cada uso. Atenção: É importante que a viseira não seja esfregada, pois isto poderá arranhá-la, diminuindo a sua transparência.
- Deixar escorrer e secar verticalmente em temperatura ambiente por 5 minutos. Atenção:

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS VISEIRAS E ÓCULOS	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.008-02	02	3/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Segunda Revisão	Setembro 2021	
			não sobrepor as peças durante a secagem.
DESINFECÇÃO			
Realizar a Desinfecção do Material	Técnico de Enfermagem	Viseiras/óculos	- Diluir o Surfanio conforme orientações do fabricante; - Fazer Fricção com Surfânicos por 15 segundos. - Embalar após fricção em sacos plásticos colocando data da desinfecção e validade da mesma. - Encaminhar aos setores.

4. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Limpeza: é o primeiro passo para o reprocessamento de artigos, e está intimamente ligada a qualidade do processo, pois com a retirada da matéria orgânica consegue-se diminuir o número de microrganismos sobre o artigo.

Desinfecção: é o processo aplicado a um artigo ou superfície que visa a eliminação de microrganismos, exceto esporos, das superfícies fixas de equipamentos e mobílias utilizadas em assistência à saúde. A desinfecção é indicada para artigos semicríticos que entram em contato com membranas mucosas ou pele não íntegra. Sendo os mais comuns: acessórios para assistência respiratória, diversos endoscópios, espéculos, lâminas para laringoscopia, entre outros.

IT.COVID.008-02



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS VISEIRAS E ÓCULOS	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.008-02	02	4/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Segunda Revisão	Setembro 2021	

- ✓ Detergente enzimático para limpeza de dispositivos médicos: produto cuja formulação contém, além de um tensoativo, pelo menos uma enzima hidrolítica da subclasse das proteases EC 3.4, podendo ser acrescida de outra enzima da subclasse das amilases EC 3.2 e demais componentes complementares da formulação, inclusive de enzimas de outras subclasses, tendo como finalidade remover a sujidade clínica e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos;


Diluição: 1ml para 1 litro de água. Deve-se desprezar após procedimento, devido a sua inativação após 5 minutos.

- ✓ Surfanios é um detergente desinfetante concentrado composto por quaternário de amônio de 4ª geração, sem perfume, sem álcool, não corrosivo, pH neutro, compatível com polímeros e metais. Portanto é ideal para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares, pisos e paredes, equipamentos e artigos médicos não críticos, sendo eficaz frente bactérias Multi-R, fungos, incluindo Candida auris e Vírus.

Diluição recomendada: 2,5ml de surfanios para 1 litro de água no borrifador, por período de validade de 30 dias.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS VISEIRAS E ÓCULOS	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.008-02	02	5/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Segunda Revisão	Setembro 2021	

5. APRESENTAÇÃO DO FLUXO

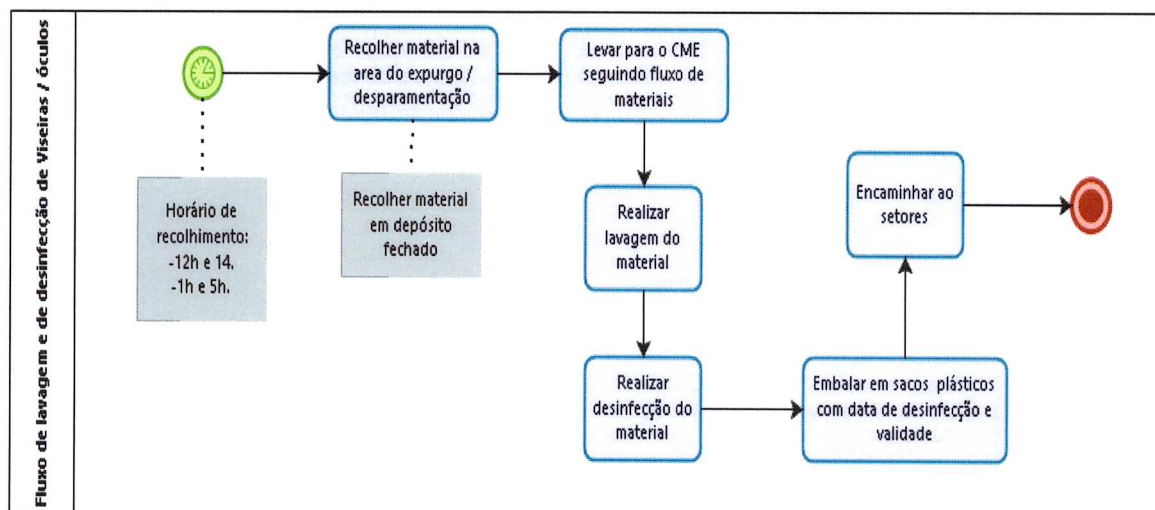

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS VISEIRAS E ÓCULOS	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.008-02	02	6/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Segunda Revisão	Setembro 2021	

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC Nº 15, de 15 de Março de 2012. **Dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.** Diário oficial da União: Brasília.


IT.CME.001-1

BRASIL. Ministério da Saúde Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**ANVISA**). Resolução RDC Nº 55, de 21 de Novembro de 2012. Dispõe sobre os detergentes enzimáticos de uso restrito em estabelecimentos de assistência à saúde com indicação para limpeza de dispositivos médicos e dá outras providências. Diário oficial da União: Brasília; 2012.

Diretrizes de Práticas de Enfermagem Cirúrgica e Processamento DE Produtos para a Saúde – SOBECC/ Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização – 7 ed. rev. E atual - Barueri, SP: Manole; São Paulo: SOBECC, 2017.

Laboratoires Anios - 001917 = SURFANIOS PREMIUM ES, France; 2009. [Acesso em 01 abril 2020]. Disponível em: https://www.exa.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/AMONIO-SUPERFICIES_Resumen-Dossier.pdf

Laboratoires Anios. **SURFANIOS PREMIUM NPC E**. France; 2017. Virucidal activity (EN 14476:2007-02): SURFANIOS PREMIUM - bovine corona virus; **Test report:** A13ML1534-3BC; 2013

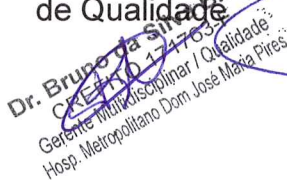	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS VISEIRAS E ÓCULOS	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.008-02	02	7/7
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Abril 2020	Emissão Inicial	Julho 2020	
Setembro 2020	Segunda Revisão	Setembro 2021	
CONTROLE DE EMISSÃO			
Elaborado por:	Verificado por:	Aprovado por:	
Lueci Lima Oliveira Coordenador da CME 	Kátia Jaqueline da Silva Cordeiro Gerente de Enfermagem  Bruno da Silva Brito Gerente Multidisciplinar e de Qualidade 	Gilberto Costa Teodózio Direção Assistencial  Antônio Cavalcanti Pedrosa Direção Geral 