

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
TROCA DE CAL SODADA ABSORVEDORA DE CO2	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CC.015-02	02	1/5
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Julho 2018	Emissão Inicial	Julho 2019	
Setembro 2021	Primeira Revisão	Setembro 2024	

1. RESULTADOS ESPERADOS

Promover conhecimento e padronização quanto a manutenção e troca da cal sodada, com a finalidade de garantir a qualidade e eficácia de sua utilização.

2. RESPONSABILIDADE

Enfermeiro;
Técnico de Enfermagem (auxiliar de equipamentos);
Anestesiologista.

3. PROCESSOS/SETORES RELACIONADOS

Centro Cirúrgico;
Farmácia Satélite.

4. MATERIAIS

- ✓ EPI (Equipamento de Proteção Individual);
 - Luva estéril;
 - Máscara cirúrgica;
 - Touca cirúrgica.
- ✓ Frasco de cal sodada;
- ✓ Álcool a 70%;
- ✓ Pano perfex;
- ✓ Etiqueta de identificação;
- ✓ Caneta.

Caneta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IT.CC.015-02

[Handwritten signature]

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
TROCA DE CAL SODADA ABSORVEDORA DE CO2	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CC.015-02	02	2/5
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Julho 2018	Emissão Inicial	Julho 2019	
Setembro 2021	Primeira Revisão	Setembro 2024	

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

A cal sodada faz parte da prática clínica diária do anestesiológico. É um absorvedor de dióxido de carbono no sistema respiratório do aparelho de anestesia, o que permite que seja utilizado um baixo fluxo de gases frescos a fim de reduzir o consumo de anestésico, manter a temperatura corporal do paciente, conservar a humidade das vias aéreas e evitar poluição na sala de cirurgia.

AOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM (AUXILIAR DE EQUIPAMENTOS)

- A. Solicitar a cal sodada junto à farmácia satélite;
- B. Desprezar a cal sodada existente no frasco do carro de anestesia em local apropriado (lixo contaminado do expurgo);
- C. Realizar desinfecção do frasco com álcool a 70% com a utilização do pano perfex;
- D. Reabastecer o frasco com a nova cal sodada;
- E. Identificar o frasco com data de troca e o nome do responsável;
- F. Registrar em ocorrência a troca do cal sodada.

AOS ANESTESIOLOGISTAS

- A. Sinalizar quando necessário, troca da cal sodada;
- B. Acompanhar data das trocas da cal sodada.

Oneto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IT.CC.015-02

[Handwritten signature]

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
TROCA DE CAL SODADA ABSORVEDORA DE CO2	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CC.015-02	02	3/5
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Julho 2018	Emissão Inicial	Julho 2019	
Setembro 2021	Primeira Revisão	Setembro 2024	

RECOMENDAÇÕES PARA TROCA

- ✓ Uso contínuo do aparelho de anestesia por mais de 8h;
- ✓ Alteração da coloração do absorvedor até a metade inferior do compartimento;
- ✓ Sinais clínicos de retenção de CO2 (sinalizado pelo anestesiolegista);
- ✓ Evidenciar absorvedores ressecados;
- ✓ Realizar duas trocas semanais dos absorvedores, nas quartas e sábados (Institucional).

6. RISCOS

RISCOS ASSISTENCIAIS

- ✓ Falha na identificação de troca da cal sodada;
- ✓ Sinais clínicos de retenção de CO2 pelo paciente.

RISCOS AMBIENTAIS

- ✓ Descarte inadequado de resíduos.

Donato

Juarez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

IT.CC.015-02

[Signature]

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
TROCA DE CAL SODADA ABSORVEDORA DE CO2	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CC.015-02	02	4/5
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Julho 2018	Emissão Inicial	Julho 2019	
Setembro 2021	Primeira Revisão	Setembro 2024	

7. REFERÊNCIAS

LEMOS, S. C.; POVEDA, V. B.; PENICHE, A. C. G. Construção e Validação de um Protocolo Assistencial de Enfermagem em Anestesia. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**. Ribeirão Preto. V.25. Dez. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rlae/v25/pt_0104-1169-rlae-25-e2952.pdf>. Acesso em: 21 de Mai de 2021.

CARMAGNANI, M. I. S. al. **Procedimentos de enfermagem: guia prático**. 2ª ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

Boneto

PD

Judicis

ru

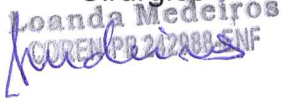


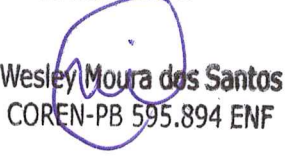


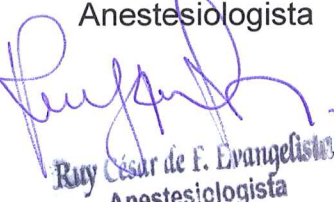

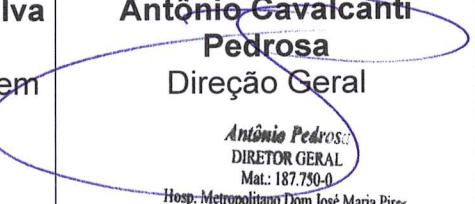
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IT.CC.015-02

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
TROCA DE CAL SODADA ABSORVEDORA DE CO2	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CC.015-02	02	5/5
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Julho 2018	Emissão Inicial	Julho 2019	
Setembro 2021	Primeira Revisão	Setembro 2024	

CONTROLE DE EMISSÃO		
ELABORADO POR:	VERIFICADO POR:	APROVADO POR:
<p> Loanda Carla Araújo de Medeiros Coordenadora de Enfermagem do Centro Cirúrgico  Loanda Medeiros COREN-PB 242088 ENF </p>	<p> Renata Gomes Barreto Coordenadora da Terapia Ocupacional e de Qualidade  Renata Gomes Barreto Coord. de Terapia Ocupacional / Qualidade CREFITO 19069-TO Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires </p>	<p> Gilberto Costa Teodózio Direção Assistencial  Gilberto C. Teodózio COREN 392110 DIRETOR ASSISTENCIAL Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires </p>
<p> Wesley Moura dos Santos Enfermeiro  Wesley Moura dos Santos COREN-PB 595.894 ENF </p>	<p> Bruno da Silva Brito Gerente Multidisciplinar e de Qualidade  Kátia Jaqueline da Silva Cordeiro G. Multidisciplinar e de Qualidade CREFITO 186.395 Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires </p>	<p> Thiago Vila Nova Direção Técnica  Thiago Vila Nova DIRETOR TÉCNICO Mat.: 909.222-6 Hosp. Metrop. Dom José Maria Pires </p>
<p> Ruy Cesar de Freitas Evangelista Anestesiologista  Ruy Cesar de F. Evangelista Anestesiologista CRM-PB 3556 </p>	<p> Kátia Jaqueline da Silva Cordeiro Gerente de Enfermagem  Dr. Bruno da Silva Brito CREFITO 19069-TO Gerente Multidisciplinar e de Qualidade Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires </p>	<p> Antônio Cavalcanti Pedrosa Direção Geral  Antônio Pedrosa DIRETOR GERAL Mat.: 187.750-0 Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires </p>