

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
MONTAGEM DE BOMBA DE CONTRASTE NA SALA DE TOMOGRAFIA GE	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CDI.001-01	01	1/5
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Janeiro 2021	Emissão Inicial	Janeiro 2024	
	Primeira Revisão		

1. RESULTADOS ESPERADOS

Orientar a equipe de enfermagem no manuseio da bomba injetora de contraste na Sala de Tomografia GE, na utilização, desmontagem e higienização, resultando na preservação do equipamento e assegurando um atendimento humanizado sem riscos de contaminação para o paciente.

2. RESPONSABILIDADE

Enfermeiro Assistencial;
Técnicos de Enfermagem;
Auxiliar de Farmácia.

3. PROCESSOS/SETORES RELACIONADOS

Centro Diagnóstico por Imagem;
Higienização;
Farmácia Satélite;
Engenharia Clínica.

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- A. Revisar a Bomba de Contraste;
- B. Acionar a Engenharia Clínica se identificar problemas técnicos;
- C. Calçar as luvas de procedimento;
- D. Higienizar para evitar resíduos de contraste;
- E. Desconectar o extensor de alta pressão e desprezar;
- F. Retirar frascos de soro e contraste e desprezar em local indicado;
- G. Abrir porta frontal da Bomba de Contraste;








IT.CDI.001-01

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
MONTAGEM DE BOMBA DE CONTRASTE NA SALA DE TOMOGRAFIA GE	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CDI.001-01	01	2/5
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Janeiro 2021	Emissão Inicial	Janeiro 2024	
	Primeira Revisão		

- H. Retirar o equipo após 24 horas de uso;
- I. Higienizar a bomba com água morna;
- J. Lavar em água corrente as peças móveis;
- K. Preparar bomba para uso;
- L. Solicitar a Farmácia Satélite, o equipo específico, contrastes, soro e extensor de alta pressão;
- M. Colocar o equipo no local indicado;
- N. Fechar porta frontal;
- O. Acoplar o soro, e contrastes no local indicado;
- P. Ligar a Bomba de Contraste GE;
- Q. Seguir a sequência de funcionamento para encher o equipo;
- R. Registrar data, hora e profissional responsável;
- S. Informar ao enfermeiro assistencial que a bomba está pronta para uso.

5. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- ✓ A bomba de contraste é manuseada pelo técnico de radiologia que fica na Sala de Comando, que de acordo com a determinação do médico radiologista, aciona o volume de soro e contraste prescrito no acesso venoso periférico.














IT.CDI.001-01

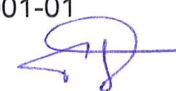

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
MONTAGEM DE BOMBA DE CONTRASTE NA SALA DE TOMOGRAFIA GE	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CDI.001-01	01	3/5
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Janeiro 2021	Emissão Inicial	Janeiro 2024	
	Primeira Revisão		

6. REFERÊNCIAS

CAMPOS, N. **Meios de Contraste e Bomba Injetora**. Disponível em:

<<https://pt.slideshare.net/workcientifica/meios-de-contraste-e-bomba-injetora>>.

Acesso em: Janeiro, 2021.

LUZ, S. **Portal da Enfermagem: Protocolos**. Disponível em:

<<https://www.portaldaenfermagem.com.br/protocolos-leitura.asp?id=283>> Acesso em:

Janeiro, 2021.

ULRICH MEDICAL. **Bomba injetora de contraste para scanner**. Disponível em:

<<https://www.medicalexpo.com/pt/prod/ulrich-medical/product-70397-722210.html>>.

Acesso em: Janeiro, 2021.

Boneto

A A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IT.CDI.001-01

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
MONTAGEM DE BOMBA DE CONTRASTE NA SALA DE TOMOGRAFIA GE	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CDI.001-01	01	4/5
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Janeiro 2021	Emissão Inicial	Janeiro 2024	
	Primeira Revisão		

CONTROLE DE EMISSÃO		
ELABORADO POR:	VERIFICADO POR:	APROVADO POR:
<p> Chiara Luana Gomes Coutinho Barros Coordenadora de Enfermagem do CDI <i>Chiara Coutinho</i> Coord. Enf. CDI - COREN - 371759 Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires </p> <p> Eduardo Almeida Costa Gerente Médico do CDI <i>Eduardo Almeida C. Costa</i> Gerente Médico CDI - CRM-9752/PB Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires </p>	<p> Renata Gomes Barreto Coordenadora da Terapia Ocupacional e de Qualidade <i>Renata Gomes Barreto</i> Coord. de Terapia Ocupacional / Qualidade CREA 19062-TO Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires </p> <p> Bruno da Silva Brito Gerente Multidisciplinar e de Qualidade <i>Dr. Bruno da Silva Brito</i> CREFITO 371763-F Gerente Multidisciplinar / Qualidade Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires </p> <p> Kátia Jaqueline da Silva Cordeiro Gerente de Enfermagem <i>Kátia Jaqueline da Silva Cordeiro</i> Gerente de Enfermagem COREN-PB384.395 Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires </p> <p> Clara Luísa Bezerra de Rubim Costa Gerente de Engenharia Clínica <i>Clara Luísa B. Rubim Costa</i> Gerente de Engenharia Clínica - CREA 211011635-7 Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires </p>	<p> Gilberto Costa Teodózio Direção Assistencial <i>Gilberto C. Teodózio</i> Gilberto C. Teodózio COREN 392110 DIRETOR ASSISTENCIAL Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires </p> <p> Thiago Vila Nova Direção Técnica <i>Thiago Vila Nova</i> Thiago Vila Nova DIRETOR TÉCNICO Mat.: 909.222-6 Hosp. Metrop. Dom José Maria Pires </p> <p> Antônio Cavalcanti Pedrosa Direção Geral <i>Antônio Pedrosa</i> Antônio Pedrosa DIRETOR GERAL Mat.: 187.750-0 Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires </p>

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
MONTAGEM DE BOMBA DE CONTRASTE NA SALA DE TOMOGRAFIA GE	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.CDI.001-01	01	5/5
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Janeiro 2021	Emissão Inicial	Janeiro 2024	
	Primeira Revisão		

	Alex Carlos Ferreira de Araújo Gerente Operacional <i>Alex Carlos F. de Araújo</i> Gerente Operacional <small>Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires</small>	
--	--	--